

Richtige Anwendung von partikelfiltrierenden Halbmasken - Anleitung und wichtige Hinweise -

Die speziell zertifizierten FFP2-Masken / Typen KN95/N95 haben bei der richtigen Anwendung eine deutlich höhere Schutzwirkung, wenn man wichtige Hinweise bei der Nutzung beachtet! Für eine uneingeschränkte Filterleistung muss die Maske dicht am Gesicht anliegen. FFP2-Masken fallen unter die persönliche Schutzausrüstung und dienen vor allem dem Schutz des Maskenträgers vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen. FFP2-Masken ohne Ventil schützen zusätzlich auch die Mitmenschen vor möglichen Krankheitserregern in der Ausatemluft der tragenden Person. Es wird weiterhin empfohlen, nach Möglichkeit einen Abstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten.

Achtung - Für den Einmalgebrauch bestimmt und nicht waschbar. Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und gewechselt werden.

Richtiges Tragen:


- Vor dem Anlegen prüfen Sie die Maske auf Defekte bzw. Mängel. Denken Sie auch daran, die Hände vor dem Aufsetzen der Maske gründlich zu waschen oder zu desinfizieren!



oder



- Halten Sie die Maske über Nase und den Mund, ziehen Sie die Ohrschlaufen vorsichtig hinter die Ohren und überprüfen den Sitz und die Dichtheit. (Bitte achten Sie darauf, nicht die Innenseiten oder den Dichtrand der Maske zu berühren.) Hinweis: Bei Brillenträgern kann es sinnvoll sein, die Brille vor dem Aufsetzen der Maske kurz abnehmen.

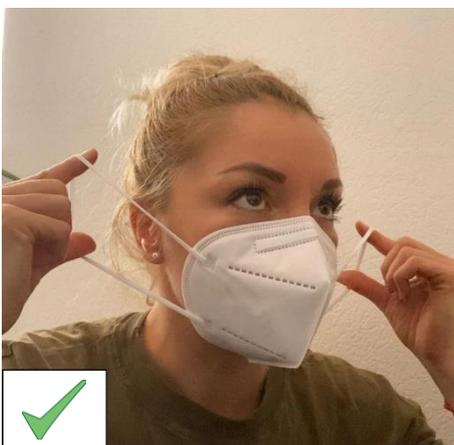

Richtig



Kontamination durch Berührung der Außenseite vermeiden!

Falsch

- Passen Sie den Nasenclip individuell an und prüfen erneut den richtigen Sitz und die Dichtheit der Maske.



→



Dichtsitz prüfen: Beim Luftholen sollte die Maske an das Gesicht angesogen werden. Kräftig in die Maske ausatmen - wenn seitlich Luft austritt, erneut anpassen! Hinweis: Bei Bart oder stark vernarbtem Gewebe im Bereich der Dichtlippe – kein Dichtsitz möglich! Die Schutzwirkung ist beeinträchtigt.

- Fassen Sie die Maske auch beim Absetzen nur an den Ohrschlaufen an, ohne die Vorder- oder Innenseite der Maske zu berühren. Denken Sie daran, die Hände im Anschluss unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich zu waschen oder zu desinfizieren.
- Entsorgen Sie die getragene Maske in einer luftdichten Tüte über den Hausmüll.



Hinweis zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge:

Es besteht für das Tragen von FFP2-Masken das Angebot zur arbeitsmedizinischen Vorsorge bei der Betriebsmedizin. Bei Fragen wenden Sie sich an die Stabsstelle AGU.